



Suma Med Rinse Plus

Abrillantador ácido y producto para el remojo en la limpieza de instrumental médico

Descripción

Suma Med Rinse Plus es una combinación de un aditivo abrillantador e ingredientes para el remojo para la limpieza de instrumental médico.

Propiedades

Suma Med Rinse Plus es un abrillantador ácido y producto para el remojo para la limpieza de instrumental médico. Ha sido especialmente formulado para usar en un amplio rango de máquinas de lavadoras-desinfectoras y máquinas de lavado automático. El producto contiene una mezcla especial de tensoactivos no iónicos y ácido para un secado rápido y libre de manchas y velos en las superficies limpias en todas las condiciones de agua. Se trata de un excelente producto para el remojo de sangre, óxido y otras suciedades y manchas. Además contiene agentes antiespumantes y es muy efectivo para evitar la formación de depósitos de cal.


Beneficios

- Combinación única de abrillantador y fórmula para remojo
- Asegura un secado rápido
- Grandes resultados sin velos ni restos
- Su fórmula concentrada proporciona un gran ahorro de costes
- Acción de baja espuma para una operación más eficiente

Modo de empleo

Suma Med Rinse Plus es dosificado normalmente en el tanque del abrillantado de la máquina a una concentración de 0.2-0.4 ml/l. (Remojo) Dosificar 1-2 litros Suma Med Rinse Plus en 10 litros de agua templada (temperaturas de 40-60°C). Dejar actuar durante 10 minutos.

Las dosificaciones están determinadas dependiendo de las condiciones locales.

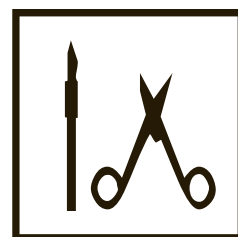

° A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Suma Med Rinse Plus

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente incoloro

pH (producto puro): 2.0

Densidad Relativa (20°C): 1.07

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseymexico.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones recomendadas de uso, Suma Med Enzyme es compatible con la mayoría de superficies hospitalarias.

*** Please translate: Do not use the concentrated product on copper, aluminium and brass. Do not use the product before washing tank and avoid the use of copper nozzles. Use also stainless steel tubes to dose the product.***