

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA COMPROBACIÓN DE LOS MENSAJES DE AUDIO

HeartSine® samaritan® PAD 350P/360P/450P/500P, Omron HDF-3500

- 1) Pulse el botón de encendido/apagado para encender el HeartSine samaritan PAD.



- 2) Escuche los mensajes de voz, pero no los siga, para asegurarse de que pueden escucharse sin que se reproduzca ningún mensaje de advertencia.
- a) Si oye el mensaje «Paciente adulto» o «Pida asistencia médica», no es necesario que realice ninguna acción más.
- b) Si no oye un mensaje:
- Deje de utilizar el dispositivo y apártelo inmediatamente.
 - Póngase en contacto con su distribuidor autorizado.
- 3) Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el HeartSine samaritan PAD. Compruebe que el indicador de estado está parpadeando en verde. Si no se escucha un mensaje de advertencia y el indicador de estado sigue parpadeando en verde, el dispositivo estará listo para su uso.
- 4) El fabricante recomienda que el usuario realice esta comprobación (pasos 1 a 3) **una vez cada tres meses**. Esto se puede hacer rápidamente sin necesidad de retirar el DEA de su estuche.
- 5) Aunque este problema de audio no genere un mensaje de advertencia, si se reproduce cualquier otro mensaje de advertencia o si aparece un indicador de estado en rojo parpadeante, consulte la sección de solución de problemas generales del manual del usuario.